


MASQUES BARRIERES CFM

NOTICE D'UTILISATION

Fabricant de ceinture orthopédique sur mesure, nous avons décidé d'élargir notre production dans la fabrication de **masques grand public**, au vu de la crise sanitaire. Il s'agit d'un montage artisanal, avec un tissu Toile (de label OEKO-TEX[®] CONFÉRENCE IN TEXTILES **STANDARD 100**  visant à garantir les qualités sanitaires et écologiques des textiles : exempt de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement). De petits fils peuvent apparaître, notamment en bas des lanières, coupez-les, ne tirez pas dessus.

Le tissu de ces masques grand public, a été certifié par la IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement) et la DGA (Direction Général de l'Armement)



Fabrication 100% française.



Testé 10 Lavages

Conseils d'utilisation et d'entretien :



Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque. Le masque vient en complément des gestes barrières.



Lavage à 60° cycle court, à part de tout autre linge de préférence dans un filet, avec détergent classique, avant le premier usage et après chaque utilisation (Dès qu'il est retiré). Il est déconseillé de laver plus de 4 masques par machine.




Essorage



Laisser sécher à l'air, à plat ou suspendu, ou en étuve. Etirer le masque encore humide dans le sens de la longueur pour lui redonner son aspect initial à la sortie de la machine à laver.



Passage au fer à repasser (sur le programme coton) pour redonner au masque son aspect initial

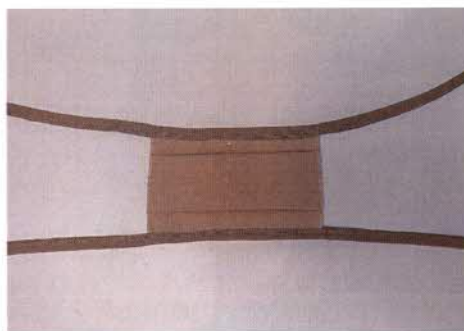

SAS CFM 161 rue de l'industrie,
01390 St André de Corcy.

Tel : 04.37.92.00.89
cfm11@wanadoo.fr